

## Gebrauchsanweisung für die Tiersäugestation

Herzlichen Dank dafür, das Sie sich für die Tiersäugestation entschieden haben.

Für eine optimale Funktion der Tiersäugestation sollten Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.

### 1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Bitten prüfen Sie nach dem Auspacken die Tiersäugestation auf Vollständigkeit und etwaige Schäden.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, welche durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstehen können.
- Die Tiersäugestation dient ausschließlich zur Aufzucht (Fütterung) von Jungtieren (Katzen, Welpen o. ä.).
- Nur bei fachgerechter Montage ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet.
- Während des ersten Gebrauchs sollten Sie die Tiersäugestation und die Jungtiere beaufsichtigen.
- Bitte benutzen Sie für die Fütterung speziell für Jungtiere geeignete Milch, die Sie im Fachgeschäft erwerben können.

### 2. Wichtige Sicherheitshinweise

- Auslaufgefahr** Vergewissern Sie sich, das nach dem Einfüllen der Milch die Tiersäugestation mit dem Deckel fest verschlossen ist. (Drehen Sie den Behälter vorsichtig auf die Seiten)  
Die Füllmenge beträgt maximal 170 ml.
- Überhitzungsgefahr** Das Kirschkerne Kissens darf nur bei 600 Watt für 1-2 Minuten in der Mikrowelle erhitzt werden (abhängig von dem von Ihnen benutzten Mikrowellengerät). Prüfen Sie die Wärme des Kissens vorsichtig an Ihrem Handgelenk.
- Verbrühungsgefahr** Bitte befüllen Sie die Tiersäugestation nur mit 35 bis max. 37 Grad warmer Milch unter Beachtung der Hinweise des Herstellers.
- Erstickungsgefahr** Achten Sie darauf, dass Sie die Öffnungen an den Mundstücken nicht zu groß wählen und die Mundstücke fest am Milchbehälter sitzen.
- Infektionsgefahr** Der Milchbehälter, Deckel und Mundstücke müssen nach jedem Gebrauch sorgfältig gereinigt (ausgekocht) werden. Insbesondere sind die Mundstücke auf Milchreste zu prüfen.  
Von den Jungtieren nicht getrunkene Milch sollte wegen der Gefahr von Keimbildung nicht in dem Milchbehälter belassen werden und auch nicht wieder verwendet werden.
- Verletzungsgefahr** Bitte erhitzen Sie vorsichtig die Nadelspitze (Stopf-, Sticknadel). Stechen Sie vorsichtig eine Öffnung in die Spitze des Mundstücks.

### **3. Lieferumfang:**

<b>Grundversion:</b>	<b>1 Milchbehälter</b> <b>1 Distanzring</b> <b>1 Deckel zum Verschließen des Milchbehälters</b> <b>8 Mundstücke am Milchbehälter</b> <b>1 Kirschkernkissen</b>
<b>De Luxe Version:</b>	<b>1 Milchbehälter</b> <b>1 Distanzring</b> <b>1 Deckel zum Verschließen des Milchbehälters</b> <b>8 Mundstücke am Milchbehälter</b> <b>8 Mundstücke zum wechseln</b> <b>2 Kirschkernkissen</b> <b>1 Fellbezug</b>
<b>Sonderzubehör:</b>	<b>Mundstücke</b> <b>Fellbezug</b> <b>Milchbehälter</b> <b>Deckel</b> <b>Distanzring</b> <b>Kirschkernkissen</b> <b>- Kann einzeln bestellt werden</b>

### **4. Anleitung:**

1. Mundstücke, die für die Fütterung der Jungtiere benötigt werden aus dem Milchbehälter lösen. Vorsichtig mit einer erhitzten Nadel (Stopf- oder Sticknadel) eine Öffnung an der Spitze anbringen und wieder in den Milchbehälter einsetzen.
2. Bereiten Sie die für Ihre Jungtiere speziell geeignete Milch nach den Angaben des Herstellers zu. Füllen Sie die zubereitete Milch (max. 170 ml) in den Milchbehälter und verschließen Sie den Milchbehälter wie folgt.  
Deckel an einer Seite anlegen und anschließend gleichzeitig mit beiden Daumen, rechts und links am Deckelrand entlangfahren bis der Milchbehälter verschlossen ist.  
Drehen Sie den Milchbehälter vorsichtig zur Seite um den richtigen Sitz des Deckels zu prüfen.
3. Das Kirschkernkissen in der Mikrowelle bei 600 Watt für 1-2 Minuten erwärmen (abhängig von dem von Ihnen benutzten Mikrowellengerät). Prüfen Sie die Wärme vorsichtig an Ihrem Handgelenk.  
Das Kirschenkissen sollte max. 40 Grad haben.  
Legen Sie nun das Kirschkernkissen in den Distanzring, direkt unterhalb des Milchbehälters ein.
4. Setzen Sie nun den Milchbehälter auf den Distanzring.
5. Bringen Sie nun den Fellbezug an (optional).

6. Stellen Sie die Tiersäugestation zu den Jungtieren, die gefüttert werden sollen.
7. Drücken Sie vorsichtig das Mundstück zusammen bis ein Tropfen Milch aus dem Mundstück austritt. Legen Sie nun ein Jungtier vorsichtig an das Mundstück an. Diesen Vorgang wiederholen Sie bei jedem anzulegenden Jungtier. Um die Trinkmenge zu prüfen, empfiehlt es sich, das Jungtier vor und nach dem Anlegen zu wiegen.

#### **5. Reinigung und Pflege:**

1. Spülen Sie nach dem Gebrauch den Milchbehälter, Deckel und den Distanzring aus.
2. Lösen Sie vorsichtig die Mundstücke aus dem Milchbehälter und spülen Sie diese ggf. bei Milchresten nach.
3. Kochen Sie nun den Milchbehälter, Deckel und die Milchstücke ca. 5 Minuten in heißem Wasser aus.
4. Anschließend nehmen Sie die ausgekochten Teile vorsichtig mit einer Greifzange aus dem heißen Wasser und lassen Sie auf Küchenpapier trocknen. Bis zum nächsten Einsatz sollte der Milchbehälter und das Zubehör abgedeckt werden.
5. Der Fellbezug ist bei 60 Grad in der Waschmaschine waschbar.

Das Kirschkerneisen kann mit einem feuchten Tuch abgerieben werden. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Kirschkerneisen in warmer Spüllauge einweichen und es anschließend in der Luft trocknen lassen.

#### **6. Material:**

Alle Teile der Tiersäugestation sind aus Silikon XIAMETER RBL-9200-Dow Corning, welches lebensmittelecht und spülmaschinenfest ist.

#### **Empfehlungen für das Wohlbefinden Ihrer Jungtiere bei der Aufzucht ohne Muttertier:**

- Pheromone wirken entspannend auf Ihre Tiere und nehmen den Stress (z.B. von Feliway)
- Fellbezug soll das Vorhandensein des Muttertieres vermitteln
- Verwenden Sie Rotlicht zum Wärmen, bei Jungtieren bis zur 6. Lebenswoche

Bildmaterial Tiersäugestation



Mundstücke



Kirschkernkissen